



Hinweis zu Passungsparameter für Exocad und 3Shape Software

Sämtliche Werte sind nur Richtwerte und können vom Kunden auf seine Verantwortung beliebig verändert werden.

Für **3Shape** Software werden folgende Passungsparameter empfohlen:

- Passungsparameter: 0,01
- Zementspalt: 0,025
- Passungsparameter Höhe: 1
- Übergangsbreite: 0,2
- Fräser: 0,7
- Fräser Korrektur: 1,1
- Fräserkorrektur AN

Für **Exocad** Software werden folgende Passungsparameter empfohlen:

- Zementspaltdicke: 0,04
- Start: 1
- End: 0
- Zusätzlicher Abstand Occlusal: 0
- Zusätzlicher Abstand X/Y: 0,01
- Zusätzlicher Abstand Occlusal Top: 0
- Horizontal: 0,1
- angewinkelt: 0,3
- Winkel: 60
- Vertikal: 0
- Unterm Rand: 0
- Unantastbare Bereiche: 0,1
- Fräserdurchmesser: 1,4