

PASSUNGSPARAMETER FÜR SOFTWARE VON 3SHAPE, DENTAL WINGS UND EXOCAD

HINWEIS: Sämtliche Werte sind nur Richtwerte und können vom Kunden auf seine Verantwortung beliebig verändert werden.

Empfehlung für Software von 3Shape

Passungsparameter	0,01 mm
Zementspalt	0,025 mm
Passungsparameter Höhe	1 mm
Übergangsbreite	0,2 mm
Fräser	0,7 mm
Fräser Korrektur	1,1 mm
Fräserkorrektur	AN

Empfehlung für Software von Dental Wings

Zementspalt	0,02 mm
vertikaler Stumpflack	0,05 mm
horizontaler Stumpflack	0 mm
Höhe über PL	0,01 mm
Mindestwandstärke	0,5 mm
Extra PL Verdickung	0,05 mm
Rand Winkel	90°
Rand Winkel Offset	0,1 mm

Empfehlung für Software von exocad

Zementspalt	0,04 mm
Start	1 mm
End	0 mm
zusätzlicher Abstand Occlusal	0 mm
zusätzlicher Abstand X/Y	0,01 mm
zusätzlicher Abstand Occlusal Top	0 mm
horizontal	0,1 mm
angewinkelt	0,3 mm
Winkel	60°
vertikal	0 mm
unter dem Rand	0 mm
unantastbare Bereiche	0,1 mm
Fräserdurchmesser	1,4 mm

Mill & More oHG

Büttnerstraße 13
30165 Hannover

T +49 (0)511 44 98 97-66

F +49 (0)511 44 98 97-44

kontakt@millandmore.de

www.millandmore.de